


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM VISEIRA MÉDICA DE POLICARBONATO CRISTAL


1

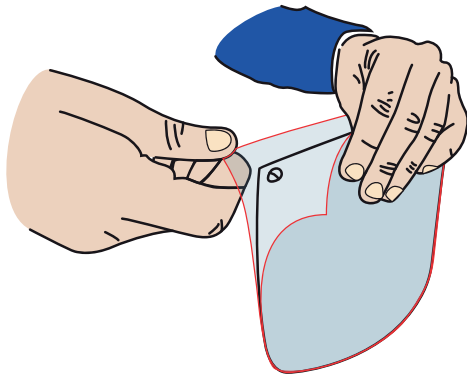

1. Retire a película de proteção de ambos os lados da viseira policarbonato.

- Remove the protective film from both sides of the polycarbonate visor.
- Retire la película protectora de ambos lados de la visera de policarbonato.


2

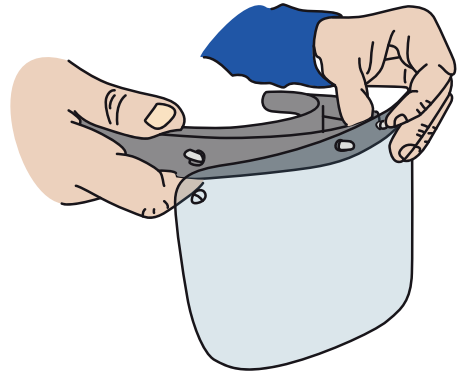

Coloque a viseira transparente no suporte, iniciando o processo pelos 2 pinos centrais

- Place the transparent visor on the support, starting with the 2 central pins.
- Coloque la visera transparente en el soporte, comenzando con los 2 pasadores centrales.


3

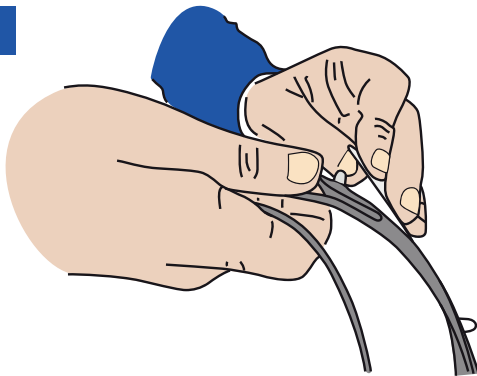

3. Empurre com delicadeza o último pino e encaixe completamente a viseira.

- Gently push the last pin and fully insert the visor.
- Empuje suavemente el último pasador e inserte completamente la visera.


4

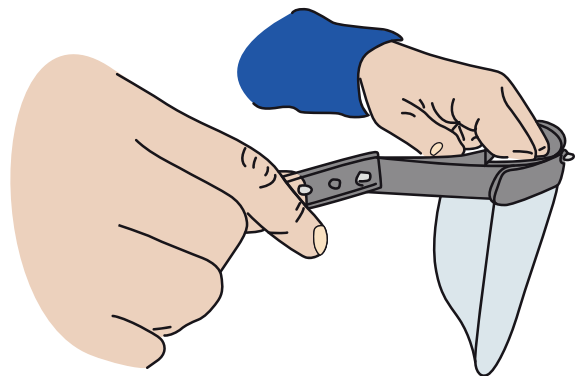

4. Num dos lados, introduza a fita elástica no suporte da viseira.

- On one side, insert the elastic tape into the visor holder.
- En un lado, inserte la cinta elástica en el soporte de la visera.


5

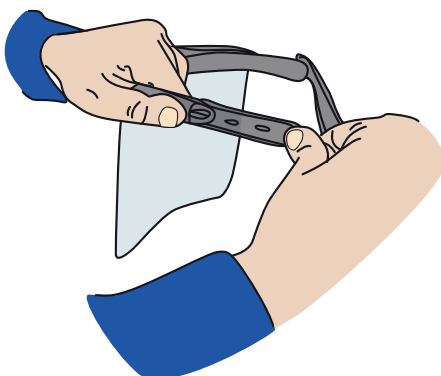

5. Encaixe no outro lado, a outra ponta da fita elástica.

- Fit the other end of the elastic tape on the other side.
- Coloque el otro extremo de la cinta elástica en el otro lado.

6

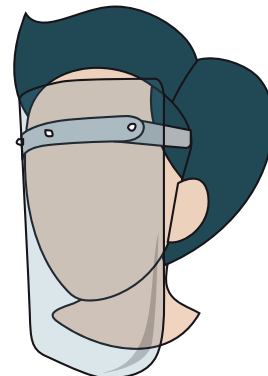

6. Coloque o suporte na cabeça com a viseira transparente virada para a frente e ajuste o elástico à sua medida.

- Place the support on the head with the transparent visor facing forward and adjust the elastic to your needs.
- Coloque el soporte en la cabeza con la visera transparente hacia adelante y ajuste el elástico a sus necesidades.